


## SOP MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN CT-SCAN REVO EVO

---



### A. MENGHIDUPKAN PESAWAT CT-SCAN

1. Pastikan power supply di panel listrik dalam posisi ON (Lampu Hijau Menyala)
2. Pastikan indikator PDU dan Gantry juga dalam posisi ON (Lampu Hijau Menyala)

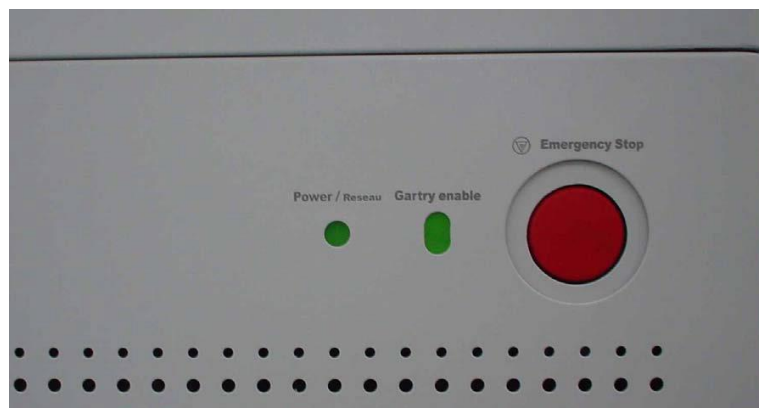


3. Tekan tombol ON pada UPS dekat monitor console sampai lampu indikator UPS berwarna hijau (UPS ON)
4. Tekan tombol pada PDU di bawah monitor console, pesawat CT-Scan ON

## B. Melakukan Proses Kalibrasi

1. Setelah pesawat CT-Scan dihidupkan pertama kali, maka lakukan proses kalibrasi dalam waktu 1 x 24 jam.
2. Klik tombol “Daily Prep” yang terletak di layar monitor kiri bagian bawah.



3. Setelah muncul kotak dialog “Fast Cal”, maka klik “OK”

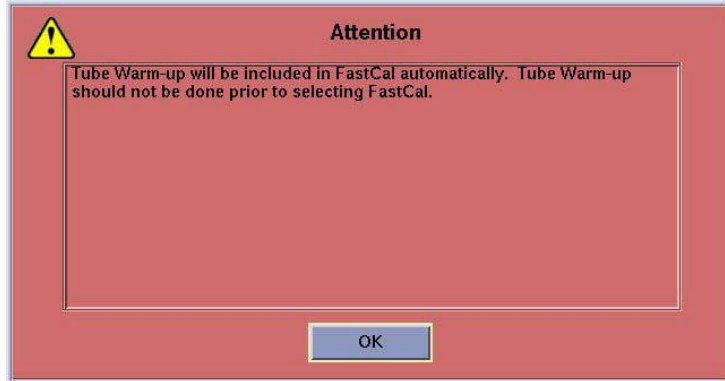

4. Tekan “Start Scan” pada keyboard yang menyala kedap kedip.



5. Proses kalibrasi sedang berlangsung, maka tunggu sampai proses kalibrasi selesai, akan ada pemberitahuan proses kalibrasi “complete”
6. Pesawat CT-Scan siap untuk dioperasikan.

### C. Melakukan Proses Warming-UP

1. Ketika pesawat CT-Scan selama 2 jam berturut-turut tidak ada pemeriksaan, maka pesawat CT-Scan akan meminta secara otomatis kepada petugas untuk melakukan proses “Warming-Up” sebelum mengerjakan pemeriksaan CT-Scan.
2. Klik tombol “Daily Prep” yang terletak di layar monitor kiri bagian bawah.




3. Pilih tombol instruksi “Warm Up”
4. Klik OK atau Confirm
5. Tekan “Start Scan” ketika menyala kedap – kedip



6. Proses “Warm Up sedang berlangsung, tunggu sampai selesai
7. Pesawat CT-Scan siap dioperasikan kembali.

### D. Mematikan Pesawat CT-Scan

1. Klik tombol “Shutdown” yang terletak di layar monitor kanan bagian atas kiri.

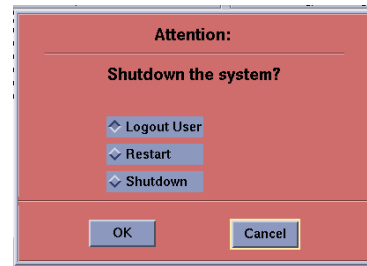

2. Pilih “Shutdown”, kemudian tekan ‘Confirm’ maka layar monitor akan muncul menu instruksi.
3. Tunggu sampai muncul instruksi “System Halted” di bawah monitor sebelah kanan.
4. Tekan tombol OFF pada PDU di bawah monitor console.
5. Tekan tombol OFF pada UPS
6. Pesawat CT-Scan sudah dalam posisi OFF.